




**Công nghệ chụp hình toàn thân đến từ người xứ Bavaria, Đức “*Made in Germany*”,
Đường cong, Đường tĩnh mạch chân, trẻ hóa da mặt và phân tích da .**

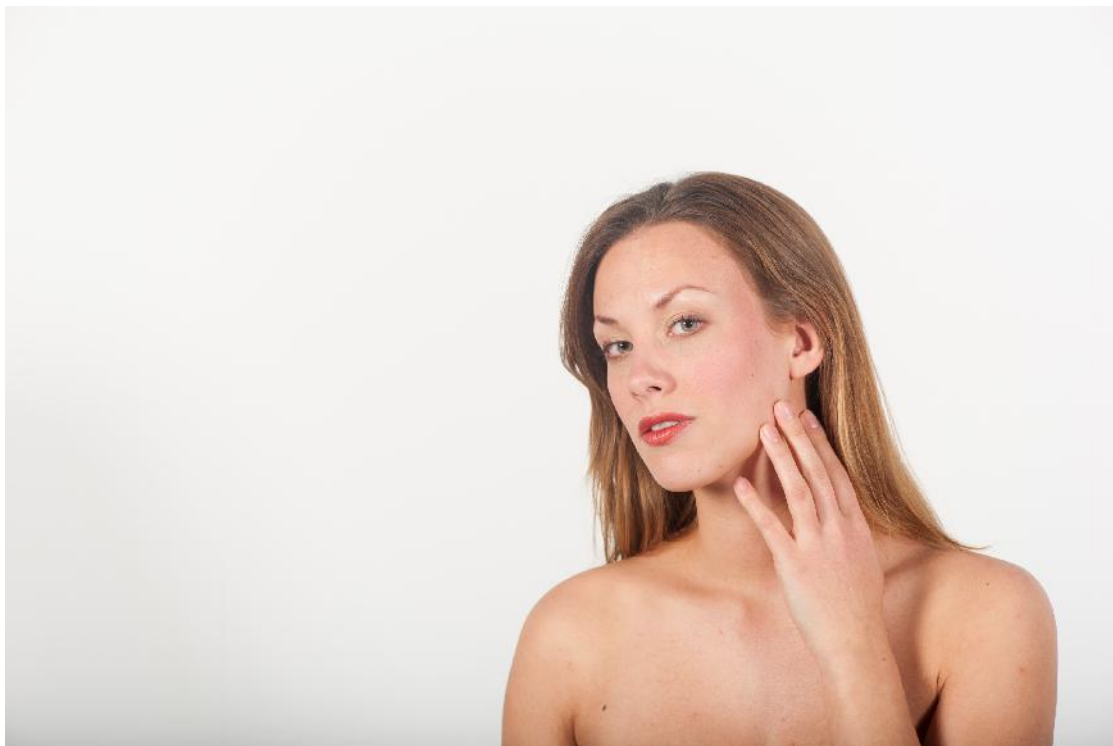

**Hệ thống chụp hình toàn thân FotoFinder sẽ giúp gì cho trung tâm, phòng khám
của bạn:**



- Hệ thống chụp hình FotoFinder chụp ảnh nhất quán, xuất sắc (nhờ đường dẫn lazer định vị vị trí chụp hình) hình ảnh sắc nét (chụp hình với hình ảnh phân cực) chính xác đến tuyệt đối, điều này giúp cho khách hàng của bạn có thể nhìn thấy những kết quả tích cực họ có được sau khi đã thực hiện các liệu trình điều trị.
- FotoFindert tự động gắn nhãn và lưu giữ hình chụp của bạn, giúp việc tìm kiếm và so sánh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
- Công cụ chỉnh sửa của FotoFinder trở nên thú vị khi nó tạo nên bản trình bày, các kế hoạch liệu trình điều trị làm trẻ hóa da.
- Công cụ báo cáo của FotoFinder cung cấp các báo cáo cá nhân, làm tăng niềm tin và sự hài lòng của bệnh nhân đối với bạn.
- FotoFinder giúp bạn thu hút thêm nhiều khách hàng mới, chuẩn hóa quy trình điều trị, làm tăng niềm tin và sự hài lòng của khách hàng.
- FotoFinder giúp việc chụp hình trở nên dễ dàng, tiết kiệm thời gian, chi phí và không còn đau đầu!

MỘT ĐIỀU QUAN TRỌNG NỮA LÀ

FotoFinder giúp bạn bán được nhiều hơn nữa các liệu trình điều trị cho khách hàng tiềm năng mới và khách hàng hiện tại.

FotoFinder mang lại những thực hành linh hoạt tối đa




Hình chụp mặt



Hình chụp mắt




Hình chụp cơ thể

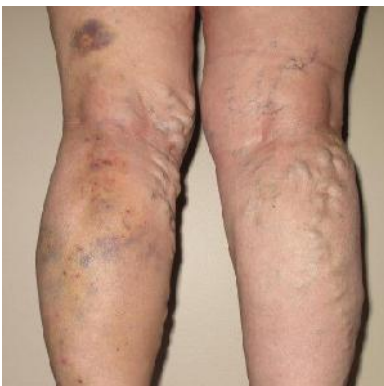


Hình chụp tĩnh mạch.

FotoFinder hệ thống chụp hình thẩm mỹ:

**Hệ thống chụp hình mặt và phần mềm phân tích da Andonia:
FotoFinder Aesthetics face**

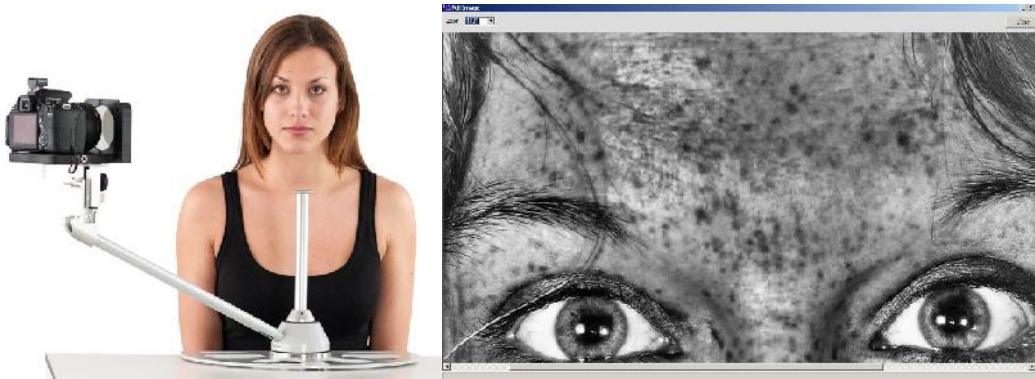

**Chụp hình mặt, toàn thân, các mạch máu chân:
FotoFinder bodystudio**

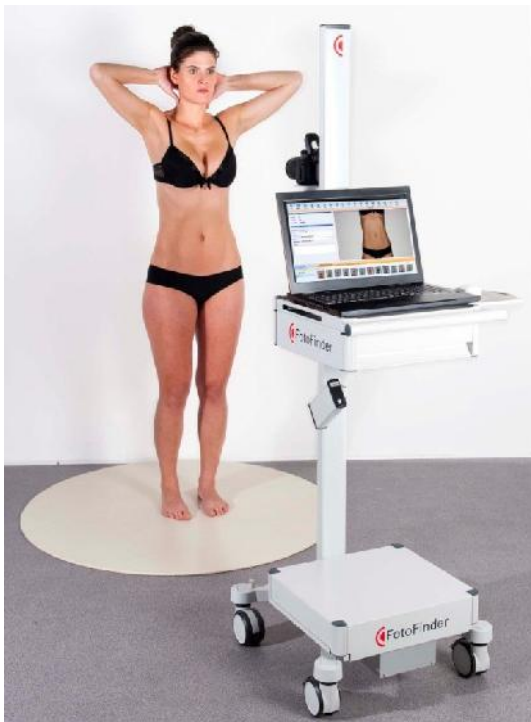

Hệ thống chụp hình FotoFinder Deluxe Imaging station dung cho mặt



- Hệ thống tài liệu nhất quán hình ảnh đầy đủ về mặt. cằm và cổ.
- Phân tích tổn thương do tia UV
- Chân đỡ làm bằng vật liệu cao cấp xoay 180o, có sẵn năm góc chụp.
- Hình ảnh rực rỡ có độ phân giải lên đến 18 megapixel
- Chức năng hướng dẫn chụp hình **Guided photography** (Bản quyền duy nhất của FotoFinder).

- Công nghệ chụp hình **Camcontrol**.
- Lập kế hoạch và báo cáo liệu trình điều trị cho khách hàng
- Phần mềm phân tích FotoFinder **aesthetics** thẩm mỹ mạnh mẽ (bản quyền của FotoFinder).

Hệ thống chụp hình toàn thân FotoFinder bodystudio



- FotoFinder **Bodystudio** với thiết kế có bàn kéo để lưu trữ thêm.
- Vị trí chụp hình với chiều cao thấp nhất là 8" (20cm) và cao nhất là 70" (180cm).
- Camera chụp hình lên xuống trong 2" bước (5cm)
- Hệ thống **định vị bằng laser**
- Hình ảnh rực rỡ có độ phân giải 18 megapixel.
- Công nghệ chụp hình **Camcontrol**.
- Máy tính **laptop** chuyên dụng.
- Phần mềm phân tích thẩm mỹ **Aesthetics** FotoFinder
- Chức năng hướng dẫn chụp hình **Guided** FotoFinder
- 4 bánh xe đúc, có phanh cố định dễ dàng di chuyển hệ thống.
- Kích cỡ: chiều dài 23" (60cm), chiều rộng 25" (64cm), chiều cao 70" (180cm)

FotoFinder lựa chọn



- Cột tháp FotoFinder **studio stand**
- Vị trí chụp hình với chiều cao thấp nhất là 8" (20cm) và cao nhất là 70" (180cm).
- Camera trượt lên xuống trong 2" bước (5cm)
- Hệ thống **định vị bằng laser**
- Hình ảnh rực rỡ có độ phân giải lên đến 18 megapixel.
- Công nghệ chụp hình **Camcontrol**.
- Máy tính **laptop** chuyên dụng.
- Phần mềm phân tích thẩm mỹ **Aesthetics FotoFinder**
- Chức năng hướng dẫn chụp hình **Guided FotoFinder**
- 4 bánh xe đúc, có phanh cố định dễ dàng di chuyển hệ thống.
(không bao gồm laptop, tấm định vị chân).



CamControl:
Phần mềm điều khiển camera cài đặt sẵn, (Flash, Aperture....)



**Camera hiển thị hình ảnh sống động trên màn hình máy tính
và ngay lập tức chuyển ảnh;**


High End Laptop - Digital SLR Camera

Kết nối thường xuyên không cần pin hoặc thẻ ghi!!

Ảnh chụp mặt :




Ảnh décolleté

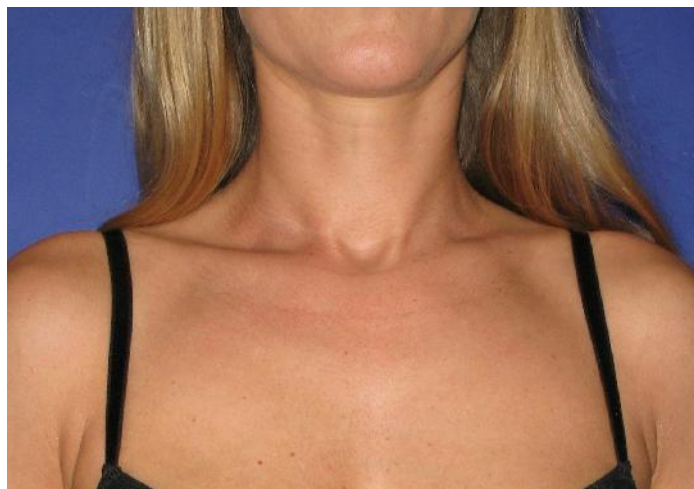

Ảnh chụp các mạch máu




Ảnh cơ thể

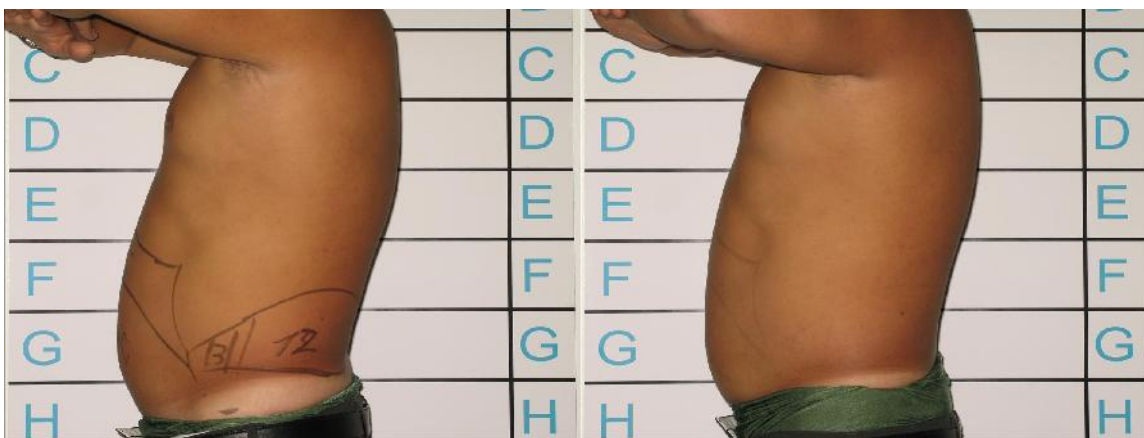


Ảnh mẫu hình chụp trước và sau khi thực hiện liệu trình Ultrasound Lipo

Ảnh cơ thể

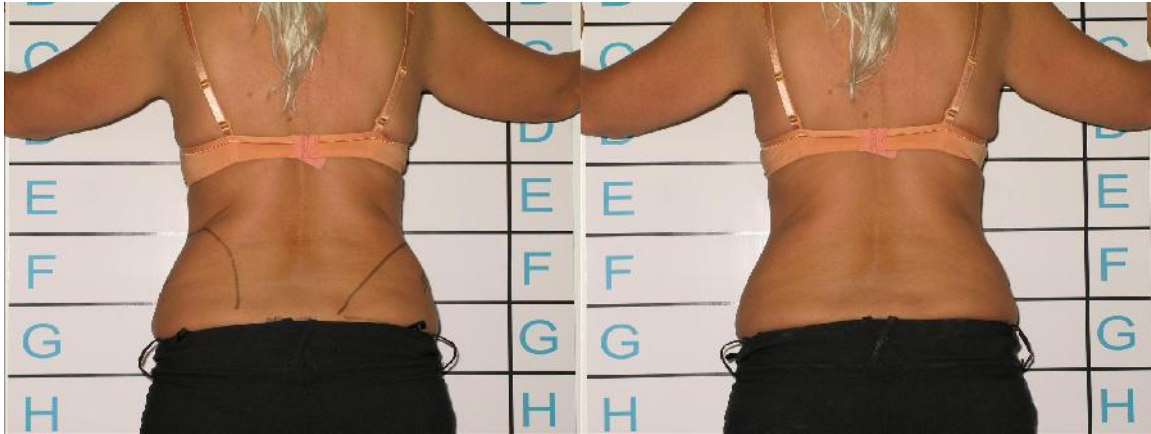

Ảnh mẫu hình chụp trước và ngay sau khi thực hiện liệu trình Ultrasound Lipo


Phần mềm FotoFinder aesthetic

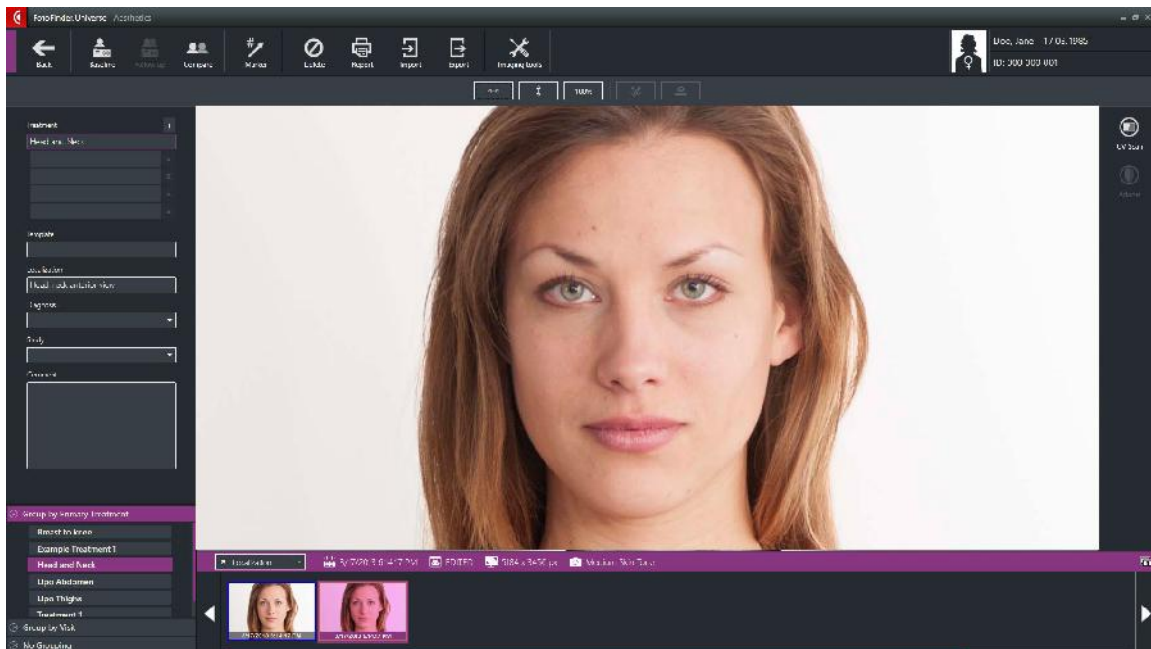

Phần mềm FotoFinder aesthetic

- Dễ dàng và nhanh chóng.
- Xử lý bằng trực quan.
- Hướng dẫn trên màn hình để định vị bệnh nhân.
- Màn hình được thiết kế rõ, dễ sử dụng.
- Tự động ghi nhận hình ảnh.
- Tối ưu hóa quá trình làm việc.
- Nhân viên của bạn sẽ thích chụp hình với FotoFinder vì nó rất dễ sử dụng, tích hợp chơn tru với quy trình làm việc của văn phòng bạn, loại bỏ bớt những bức hình rảnh tay.
- Nhân viên của bạn sẽ mất ít thời gian để chụp hình và sẽ dành nhiều thời gian hơn để giao tiếp với bệnh nhân.


Những lợi ích mà phần mềm FotoFinder aesthetics mang lại

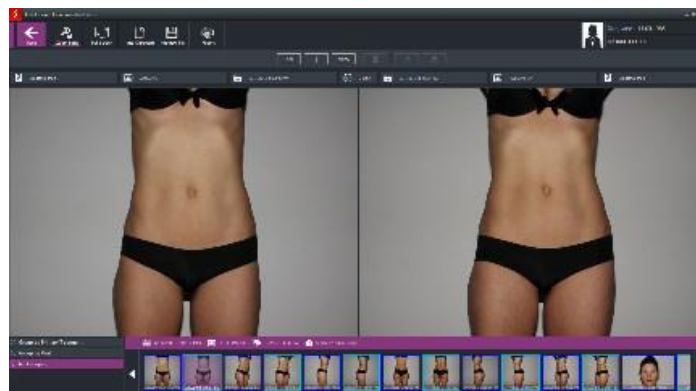




- Chụp hình có hướng dẫn.
- Phần mềm điều khiển camera cài đặt sẵn.
- Xem trước, trực tiếp trên màn hình.
- Chụp hình trực tiếp không cần Flashcard hoặc pin.
- Kiểm soát chất lượng ảnh ngay tức thì.
- Tính năng **Gosh features** giúp cho nhất quán định vị bệnh nhân.
- In báo cáo tùy chỉnh.
- Tự động ghi nhận và sắp xếp hình chụp trong thư viện ảnh

Bạn có phải là chuyên gia chụp hình y tế?

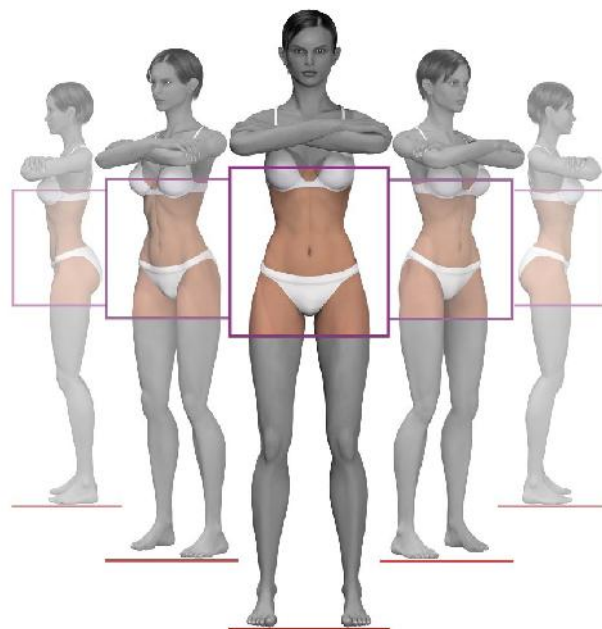


- Có thể, nhưng không phải tất cả nhân viên của bạn đều biết những tư thế tốt nhất cho việc chụp hình trong điều trị ví dụ: chụp hình bụng dưới:
- Bệnh nhân nên giữ cánh tay như thế nào?
- Nên cài đặt máy ảnh như thế nào và độ dài tiêu cự nào?
- Những vị trí nào nên được chụp ảnh?
- Khoảng cách phù hợp cho những bức ảnh này như thế nào là hợp lý?
- Có rất nhiều câu hỏi và sai lầm dẫn đến việc chụp hình trước và sau điều trị không cho thấy sự cải thiện kết quả quá trình điều trị của bạn.
- Hậu quả là bệnh nhân thất vọng và niềm tin vào các dịch vụ của bạn cũng đi theo.
- Câu trả lời chính là: **FotoFinder Guided Photography**

FotoFinder Guided Photography:

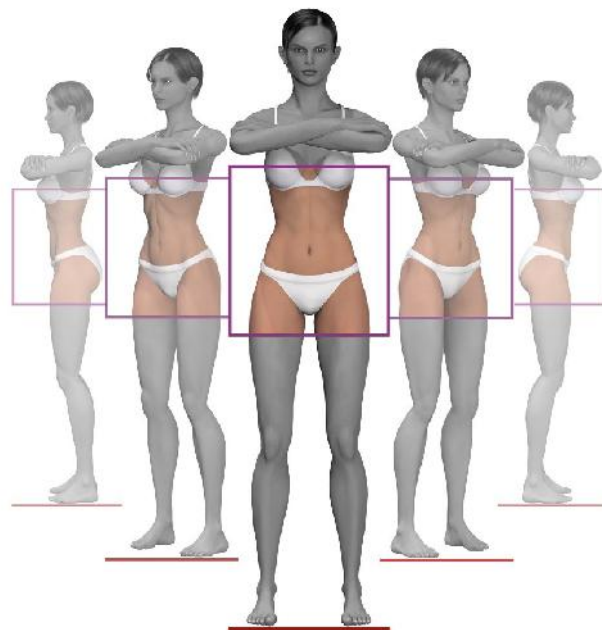

- Chỉ ra cách định vị bệnh nhân.
- Hiển thị chế độ xem trước để chụp.
- Cho biết độ dài tiêu cự và thời gian phơi sáng.
- Dẫn nhân cho mỗi bức ảnh điều trị và xem.
- Dẫn đến những hình ảnh đồng nhất từ những người sử dụng khác nhau.

Dễ dàng chụp đường cơ sở và theo dõi:

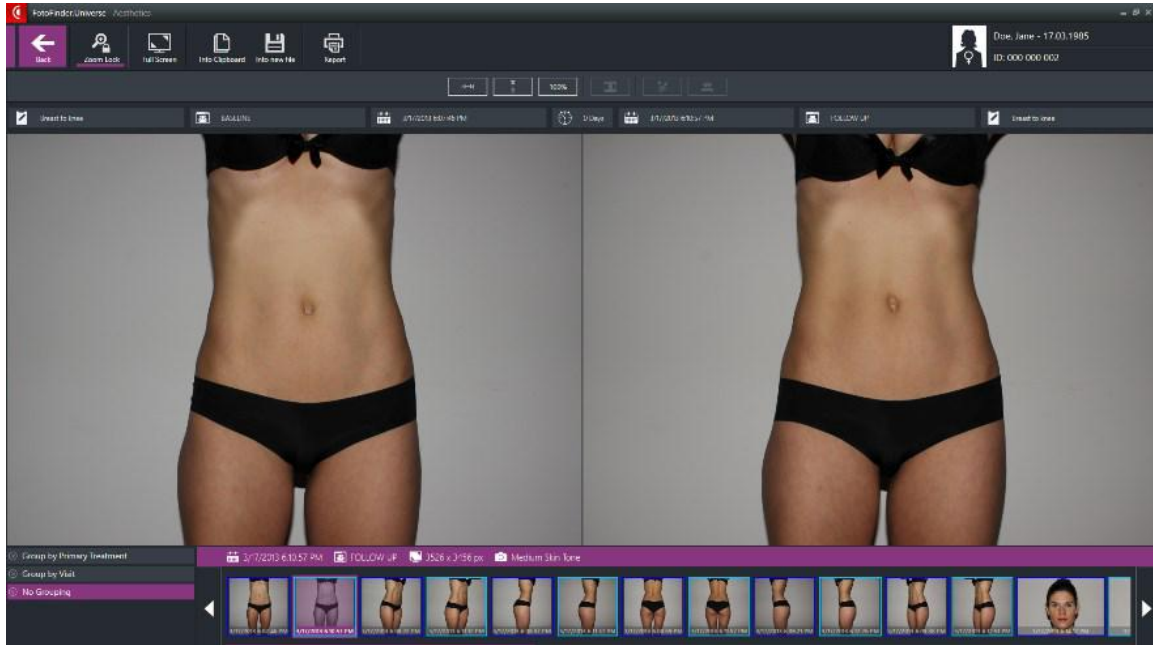

Đường cơ sở:


- Chế độ xem trước trực tiếp hiển thị trên hình ảnh.
- Đường lưới hỗ trợ cho việc định vị bệnh nhân dễ dàng.
- Chỉ cần 1 cái click chuột để chụp hình.

Theo dõi hình chụp với tính năng Gosht

- Dễ dàng tái định vị bệnh nhân để có được những hình ảnh đồng nhất.
- Hình ảnh đường cơ sở được hiển thị sống động trong nền cửa sổ hình ảnh xem trước.

Thư viện ảnh FotoFinder:


**Thư viện ảnh tự động đánh dấu những hình ảnh đường cơ sở,
theo dõi ảnh hoặc chỉnh sửa ảnh**

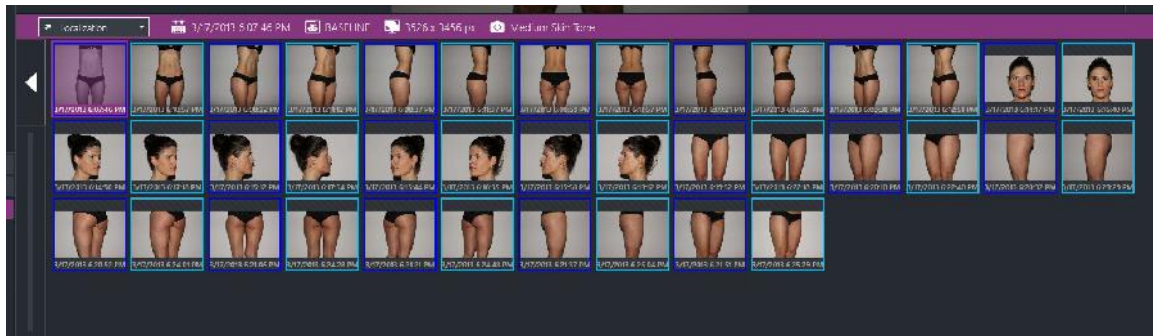


Màu xanh là đường cơ sở Màu xanh ngọc lam là theo dõi ảnh Màu đỏ là chỉnh sửa

Thư viện ảnh thông minh của FotoFinder

SmartGallery sắp xếp hình ảnh bệnh nhân của bạn bằng cách truy cập hoặc điều trị

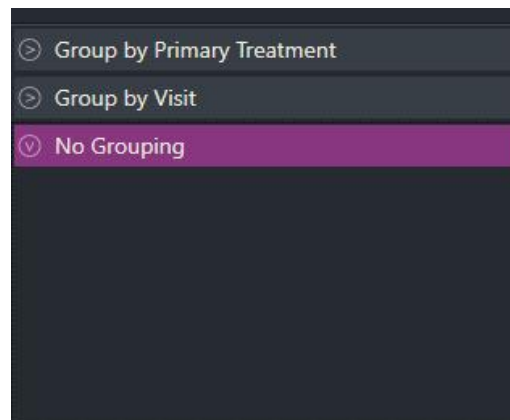

So sánh hình ảnh:

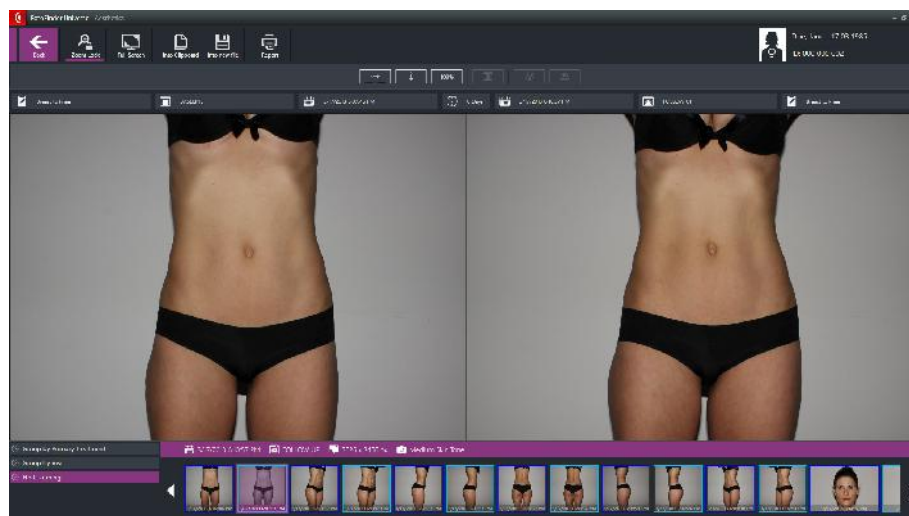

Phóng to hình

SmartZoom cho phép thu phóng đồng thời và định vị lại hình ảnh, luôn tập trung vào diện tích tương ứng trong cả hai hình ảnh.



Chỉnh sửa hình


- Tạo lập các kế hoạch làm trẻ hóa, và làm nổi bật các liệu trình điều trị theo kế hoạch.
- Dễ dàng chỉnh sửa ảnh để thuyết trình hoặc, marketing tiếp thị sản phẩm và dịch vụ bạn cần.



Báo cáo tùy chọn

- In các kế hoạch làm trẻ hóa da.
- Báo cáo liệu trình điều trị hoặc
- Báo cáo về những tổn thương do ánh nắng mặt trời..
- Logo, tên và địa chỉ trung tâm, phòng khám của bạn được máy tự động in trên báo cáo.
- Bố cục của tất cả các báo cáo có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu.

Hình ảnh có thể truy cập trên iPad của bạn

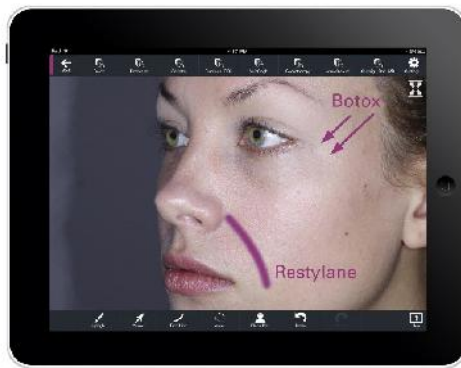

- Quản lý hình chụp trước và sau trên iPad.
- Xem, so sánh và chỉnh sửa hình ảnh
- Hiển thị cho khách hàng của bạn về kế hoạch điều trị và kết quả sau điều trị.
- Chức năng kéo và thả hình ảnh trực quan
- Dễ dàng kết nối với phần mềm thẩm mỹ Aesthetics FotoFinder qua internet wi-fi.

- FotoFinder: Bản đồ thiết lập hình ảnh về da hàng đầu thế giới
- Có mặt trên thị trường từ 1991.
- Dẫn đầu thế giới về công nghệ chụp hình tự động toàn thân, và ống kính soi da kỹ thuật số.
- Người đầu tiên phát minh ra công nghệ soi chụp da **eDescopy** và **handyscope**
- Sản phẩm được hàng ngàn khách hàng ưa chuộng tin dùng trên 90 quốc gia.
- Chúng tôi hoạt động giống như một gia đình chung.
- Sản phẩm của FotoFinder tuân thủ theo các quy chuẩn về chất lượng của ISO 9001:2008



FotoFinder Systems GmbH
 Industriestrasse 12
 84364 Bad Birnbach, Germany
 Phone : +49 8563 97720-00
 Fax : +49 8563 97720-10
 Email : info@fotofinder.de
 Website: www.fotofinder-systems.eu
 Management: Dipl. Ing. (FH) Rudolf Mayer & Andreas Mayer

Đại diện duy nhất tại Việt nam
FOTOFINDER VIỆT NAM
CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THẢO NGUYÊN
 đ/c: P.702, 14 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà nội
 Tel: 0084. 2 38214547
 Hotline: 0084 0913043372
www.fotofinder.vn
 or www.fotofinder.de

