

Bodyscan ATBM®.

Một trợ giúp quan trọng trong việc tìm kiếm, phát hiện nốt ruồi mới và những thay đổi.

Kiểm ra thăm khám bệnh nhân mắc hội chứng loạn sản nevus:



Phòng ngừa ung thư da hoàn chỉnh là việc kiểm soát được toàn bộ những nốt ruồi mới đã xuất hiện kể từ lần kiểm tra cuối cùng.

Mặc dù soi da kỹ thuật số cho phép bạn quan sát lâu dài từng nốt ruồi nevi đơn lẻ, nhưng việc kiểm soát toàn thân thì không hề dễ dàng, đặc biệt đối với những bệnh nhân có nhiều nốt ruồi. Việc so sánh hình ảnh lâm sàng bằng mắt thường là một quá trình tốn thời gian và không thể cho kết quả đáng tin cậy.

FotoFinder **bodystudio ATBM** là một quá trình tự động hóa hoàn toàn, giờ đây bạn có thể dễ dàng thực hiện kiểm tra toàn bộ da cơ thể. Phần mềm chuyên biệt **Bodyscan ATBM** giúp bạn so sánh hình ảnh và tìm ra tổn thương mới cũng như những thay đổi.

Không giống các phiên bản trước, hệ thống ATBM sẽ tự động tìm kiếm và phân tích những thay đổi, do đó bạn không phải chọn từng hình ảnh và xuất chúng sang Bodyscan. Chỉ cần một cú nhấp chuột, các thay đổi được xác định và được hiển thị rõ ràng trên màn hình.


Tính năng tự động so sánh hình ảnh tổng thể toàn thân:

Sử dụng hệ thống FotoFinder **bodystudio ATBM** để có được những hình ảnh cơ bản, theo dõi nhất quán cần thiết cho việc phân tích với **Bodyscan ATBM**.

Bệnh nhân được đặt ở vị trí phía trước tấm hình nền màu xanh lam, việc chụp hình sẽ được thực hiện theo sơ đồ hướng dẫn trong phần mềm máy tính (20 vị trí tiêu chuẩn, cộng với các phân đoạn bổ sung nếu được yêu cầu). Máy được trang bị một hệ thống laser để định vị tiêu chuẩn, có thể chụp ảnh toàn bộ cơ thể với khoảng cách có thể lặp lại.

Đối với những hình ảnh tiếp theo, tính năng **“Ghost”** trong phần mềm sẽ hiển thị hình ảnh đường cơ sở trong dữ liệu của cửa sổ hình ảnh xem trước trực tiếp, hỗ trợ người dùng đạt được vị trí giống hệt nhau. Nhờ vậy, những hình ảnh thu được, được thực hiện nhanh chóng và dễ dàng!

Sau khi chụp được những hình ảnh tiếp theo, máy sẽ ngay lập tức tự động phân tích những thay đổi được phát hiện.

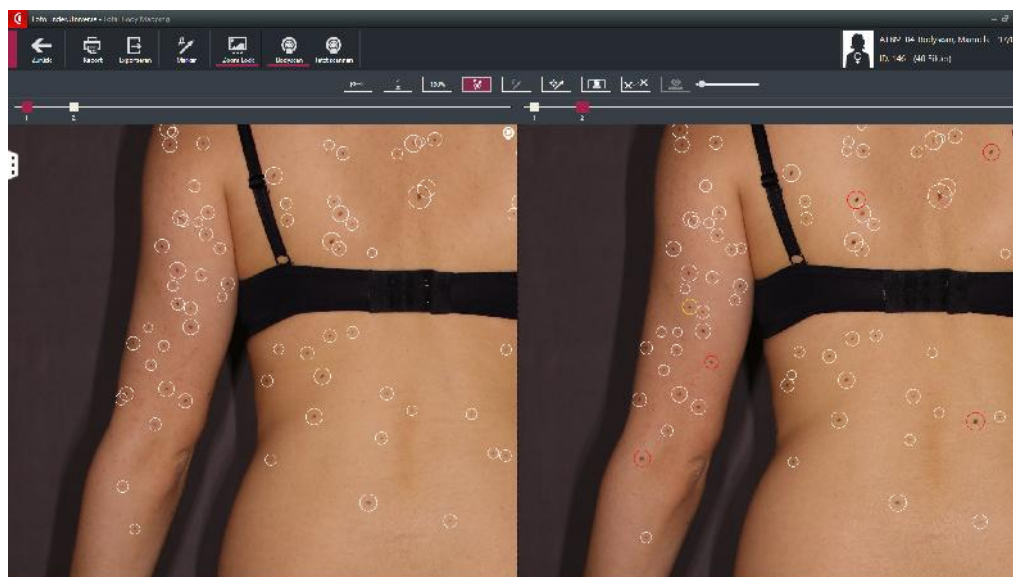

Tự động dò tìm, chỉ ra những nốt ruồi mới và những thay đổi:

Phần mềm sẽ tự động dò tìm, những thay đổi mới được phát hiện sẽ được đánh dấu bằng các vòng tròn.

Vòng tròn màu trắng có nghĩa là không có thay đổi; **màu vàng** cho thấy những thay đổi nhỏ và **màu đỏ** cho thấy nốt ruồi mới. Các vòng tròn màu trắng có thể được tắt để tập trung tốt hơn vào các vòng màu đỏ và màu vàng. Vòng tròn **màu xám** biểu thị nốt ruồi nằm bên ngoài khu vực so sánh, ví dụ: nếu vị trí cơ thể đã thay đổi một chút.

Với chức năng **tìm kiếm** bạn có thể xem chi tiết từng nốt ruồi. Nhờ độ phân giải cao, bạn có thể dễ dàng kiểm tra xem những thay đổi trên da có đáng nghi hay không.

Những nốt ruồi nevi không điển hình có thể được đánh dấu và kiểm tra lại bằng máy soi da kỹ thuật số FotoFinder .

Lưu ý: Việc chụp hình toàn thân **Bodyscan ATBM** không thay thế việc kiểm tra nốt ruồi bằng soi da và kiểm soát hình ảnh của toàn bộ hình ảnh cơ thể. Nó chỉ cung cấp hỗ trợ trong việc định vị, tìm kiếm các thay đổi!

Đại diện duy nhất tại Việt nam

FOTOFINDER VIỆT NAM

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THẢO NGUYỄN

Đ/C: P.702, 14 Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Tp Hà nội

Tel: 0084. 2 38214547

Hotline: 0084 0913043372

www.fotofinder.vn

or www.fotofinder.de